

Guía de uso cilindro tradicional


Suministro de oxígeno medicinal en cilindros de alta presión para oxigenoterapia

Cómo colocar y conectar los cilindros de oxígeno medicina.


Instalación del regulador de presión.

- Asegúrate que el cilindro se encuentre en posición vertical, sobre una superficie plana sin desnivel y, sujeto a una base o pared fija (a una altura no menor de 2/3 de su altura total).
- Retira el capuchón del cilindro.
- Verifica que la válvula del regulador esté cerrada.
- Coloca el regulador en la conexión de la válvula del cilindro y ajusta la tuerca del regulador, si es necesario, utiliza una llave.
- Ten cuidado de no apretar en exceso la conexión evitando dañar el regulador.
- Sostén siempre el regulador de la parte central, nunca de los manómetros o indicadores de nivel para evitar dañarlos.
- Abre el flujo del oxígeno girando lentamente la válvula del cilindro una vuelta completa en dirección OPUESTA a las manecillas del reloj.
- Verifica que la conexión NO presente fuga, hazlo utilizando un líquido especial para detección de fugas. Nunca utilices sustancias jabonosas.
- Si genera burbujas, cierra de nuevo la válvula y haz los ajustes necesarios.
- Si la fuga persiste comunícate al 555 MEDIGAS (633 4427) Centro de Soluciones.
- Si es necesario, coloca un adaptador de plástico para la salida de oxígeno o un vaso humidificador a la salida del regulador.
- En caso de utilizar vaso humidificador, llénalo con agua bidestilada hasta la línea máxima de llenado que indica el vaso. Ten cuidado de NO sobrellenarlo de agua, evitando que la misma entre a la cánula.
- Posteriormente enrosca el vaso humidificador al regulador y conecta la cánula a la salida del vaso humidificador.

Manejo seguro del oxígeno medicinal en cilindros

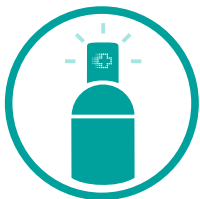

1. Verifica que el cilindro tenga sello de garantía.

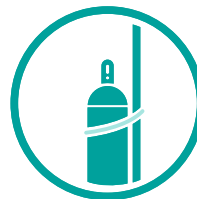


4. Sujeta el cilindro a un punto fijo. Evita caídas.



2. No modifies el flujo de oxígeno sin prescripción médica.



5. Evita usar productos a base de petróleo y aerosoles mientras usas el oxígeno.

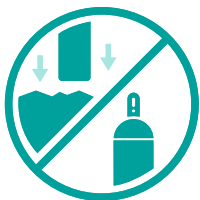

3. No coloques el cilindro sobre una superficie irregular.



6. No fumar mientras se usa el oxígeno.



7. Mantén todas las flamas abiertas lejos del cilindro.




8. Evita colocar los cilindros o equipos en áreas cerradas.




9. Mantén el cilindro o equipo fuera del alcance de los niños.



10. Evita golpear los cilindros.

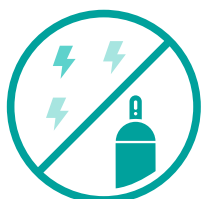

11. Aleja el cilindro o equipo de contactos eléctricos.

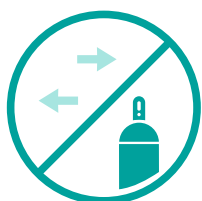

12. Evita mover los cilindros entre las habitaciones de tu domicilio.



13. Nunca transportes cilindros de oxígeno en tu automóvil.



14. El trasvase de oxígeno está prohibido.




15. Al abrir la válvula, no te coloques frente al regulador.



16. Si detectas una fuga, repórtala inmediatamente.



17. Cierra la válvula del cilindro cuando no se utilice.

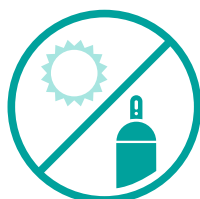


18. No almacenes los cilindros en sitios con altas temperaturas.



19. Se recomienda contar con extintores de incendio para casos de emergencia.

Diagrama de cilindro de oxígeno medicinal

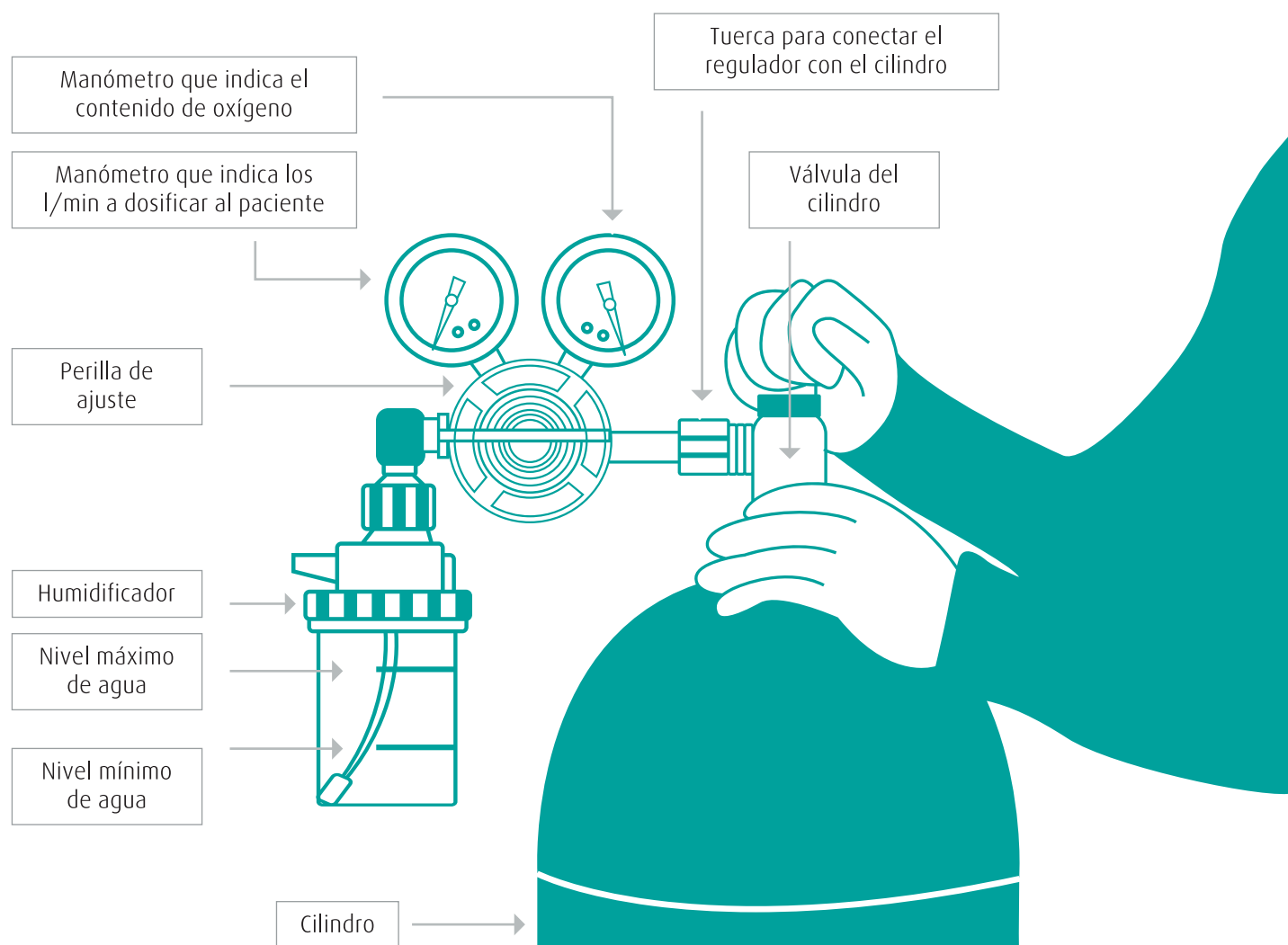



tiendamedigas.com.mx
medigas.mx