

Guía de uso válvulas especiales

¿Cómo regular el flujo de oxígeno medicinal indicado por tu médico?

- Utilizando el regulador (o en su caso, la válvula Viproxy), ajusta el flujo en litros por minuto (l/min) indicado por tu médico.
- Si tu regulador cuenta con manómetro, gira la perilla de ajuste de la válvula del cilindro hasta que la aguja del manómetro apunte el valor prescrito por tu médico.
- En caso de tener flujómetro de flotador, gira la perilla de control de flujo hasta que el flotador esté centrado en la línea del valor correcto de flujo en litros por minuto indicado por tu médico.
- Para el caso de los cilindros que vienen integrados con la válvula especial tipo Viproxy, únicamente se dosifica el flujo sin necesidad de colocar un regulador de presión adicional.
- Coloca la cánula o mascarilla al paciente para iniciar el suministro de oxígeno medicinal.
- Recuerda que modificar el flujo de oxígeno o frecuencia de uso sin prescripción médica puede ser riesgoso para la salud.

Instrucciones para dosificación de oxígeno a paciente


Para iniciar la dosificación, deberás girar la perilla a favor de las manecillas del reloj, puede ser desde 0.5 l/min. hasta 25 l/min.



Accesorios que integran el equipo para el sistema de humidificación




Cilindro con válvula especial sellada.

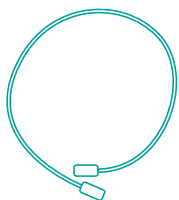

Tubing cilindro-vaso humidificador



Vaso humidificador

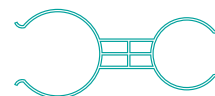

Soporte de vaso humidificador

¿Cómo determinar el contenido de oxígeno en el cilindro?

- Es muy importante verificar la cantidad de oxígeno medicinal que tiene el cilindro y cuánto tiempo podría durar, utilizando el manómetro del regulador.
- Te pedimos revisar periódicamente el manómetro o flujómetro del regulador para poder realizar con anticipación tu pedido evitando que se termine el oxígeno en tu cilindro.
- La duración del oxígeno medicinal dependerá del tamaño del cilindro, el flujo en litros que esté utilizando y la cantidad de oxígeno medicinal en el cilindro.
- En caso de que, según los cálculos realizados, sólo reste suministro de oxígeno suficiente para las siguientes 24 horas, te recomendamos hacer en ese momento el nuevo pedido de recarga de oxígeno medicinal al Centro de Soluciones Medigas.

Lectura de presión de gas, equivalente a contenido de remanente para programación de recargas

Lectura de presión del cilindro, equivalente al contenido de oxígeno en el tanque (y remanente).





tiendamedigas.com.mx
medigas.mx